

Instrucțiuni de utilizare.
Vă rugăm citiți cu atenție!





Fără săruri
de zinc

Fixare stabilă pentru protezele dentare cu **Protefix®**

Protefix® Cremă adezivă Extra-forte cu **Aloe vera** cu putere adezivă în mediu umed

Gelul obținut din miezul frunzelor de Aloe vera conține numeroase substanțe vitale bioactive, care s-au remarcat în industria cosmetică prin proprietățile lor de îngrijire a pielii. Centrul de cercetări de la **Protefix®** a folosit aceste proprietăți pozitive ale Aloe vera în Crema adezivă Extra-forte. Aceasta conferă un sentiment de siguranță în purtarea protezei și este blândă și plăcută pentru mucoasa bucală. **Protefix®** Cremă adezivă Extra-forte cu **Aloe vera**, poate, datorită puterii sale de adeziune în mediu umed, să fie aplicată direct pe proteza umedă. Acțiunea este rapidă, dar și de durată și conferă siguranță și încredere pentru toată ziua, chiar și la problemele dificile de adeziune.

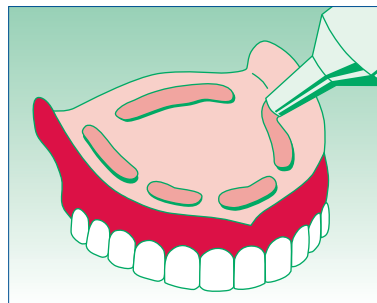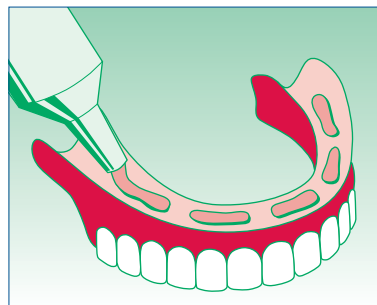

Mod de aplicare: Curățați proteza de orice resturi alimentare și depuneri și aplicați **Protefix®** Cremă adezivă Extra-forte cu **Aloe vera** pe dantura umedă, în șanțurile protezei care se aplică pe creasta gingivală. Apăsăți tubul în treimea inferioară, aproape de orificiul de deschidere. Dozați cu economie **Protefix®** Cremă adezivă Extra-forte cu **Aloe vera**, deoarece orice exces ar putea determina modificarea adeziunii protezei. La nevoie, aplicați Crema adezivă și pe partea posterioară a protezei superioare care va adera de cerul gurii. Așezați apoi proteza dentară în gură și apăsați ferm câteva secunde pentru fixarea pe gingie. Așteptați câteva minute până la prima masă. Crema adezivă aplicată nu va modifica esențial poziția protezei. După aplicarea cremei adezive, închideți tubul cu grijă, mențineți orificiul curat și uscat, deoarece pătrunderea apei poate provoca întărirea cremei adezive. Protejați conținutul tubului împotriva contactului cu lichide! Resturile de cremă adezivă pot fi îndepărtate cu ajutorul unui bețișor cu vată înmuiată în ulei comestibil. În anumite circumstanțe, poate apărea o depunere de ulei, care nu afectează efectul adeziv al cremei. Vă rugăm, îndepărtați uleiul respectiv. Folosirea cremei adezive ar trebui să fie temporară.

Dozare: Doza zilnică: până la 0,8 g (aproximativ 7 cm) cremă adezivă.

Contraindicații: Hipersensibilitate la oricare dintre ingrediente.

Efecte adverse: În cazuri izolate, reacții de sensibilitate a mucoasei cavității bucale sau chiar sistemice, nu pot fi excluse. Dacă apare o reacție alergică, vă rugăm contactați medicul stomatolog.

Sfaturi importante:

- A se folosi numai pe mucoase sănătoase.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- A nu se folosi după termenul de expirare.



Compoziție: **Protefix®** Cremă adezivă Extra-forte cu **Aloe vera** conține: amestec de săruri de sodiu și calciu ale copolimerului de metil vinil eter cu anhidrida maleică, carboximetilceluloză, parafină, vaselină, Aloe Barbandensis Miller, dioxid de siliciu, mentol, azorubină, metil 4-hidroxi-benzoat.

Data verificării textului: 09/2018.

Protefix® Cremă adezivă cu **Aloe vera**



1. **Îngrijire blândă:** Cu complexul natural pe bază de Aloe Vera, blând și plăcut pentru mucoasa bucală
2. **Adeziv pe proteza umedă:** Poate fi aplicată direct pe proteză, în mediu umed
3. **Fixare puternică:** Fixare extra-forte, pe termen lung
4. **Protecție:** Sigilarea marginală efectivă împiedică pătrunderea resturilor alimentare sub proteză

Formulă sigură: fără săruri de zinc.
Se poate folosi și pentru proteze parțiale.


Queisser
PHARMA
D-24914 Flensburg
www.protefix.ro

90727392 RO