



Instrucțiuni de utilizare.
Vă rugăm citiți cu atenție!



Fără zinc,
fără conservanți

Fixare stabilă pentru protezele dentare cu Protefix®

Protefix® Cremă adezivă PREMIUM,
cu putere adezivă în mediu umed și pe termen lung

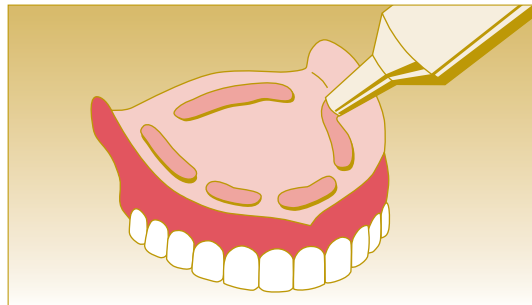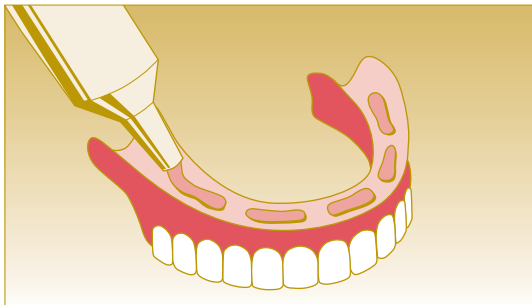

Formulă premium: fără săruri de zinc, fără conservanți. Potrivit și pentru proteze parțiale.

Indicație de utilizare:

Cremă adezivă pentru aplicarea pe proteze dentare.

Dozare și mod de utilizare:

Doza zilnică: este de până la 0,8 g cremă adezivă.

Curățați proteza dentară și mucoasa bucală de reziduuri și aplicați **Protefix® Cremă adezivă PREMIUM** din loc în loc, în strat subțire, pe proteza umedă, în șanțurile protezei maxilarului superior sau inferior, care se aplică pe creasta gingivală. Dacă este necesar, aplicați o bandă de **Protefix® Cremă adezivă PREMIUM** și pe partea posterioară a protezei superioare, care va adera de cerul gurii. Așezați apoi proteza dentară în gură și

apăsați ferm câteva secunde, pentru fixarea pe gingie.

Așteptați aprox. 5 minute până la prima masă. Dozați cu moderație **Protefix® Cremă adezivă PREMIUM**. În caz de supradozaj, aderența protezei dumneavoastră poate fi afectată.


Contraindicații:

Hipersensibilitate la oricare dintre ingredientele. Nu utilizați pe mucoasa orală cu leziuni sau cu diverse afecțiuni.

Efecte secundare:

În cazuri izolate, reacții de sensibilitate a mucoasei cavității bucale sau chiar sistemice, nu pot fi excluse. În cazul apariției unei reacții alergice, vă rugăm contactați medicul stomatolog. Toate efectele secundare asociate cu produsul ar trebui raportate producătorului și autorității naționale competente.

Protefix® Cremă adezivă **PREMIUM**, cu putere adezivă în mediu umed și pe termen lung

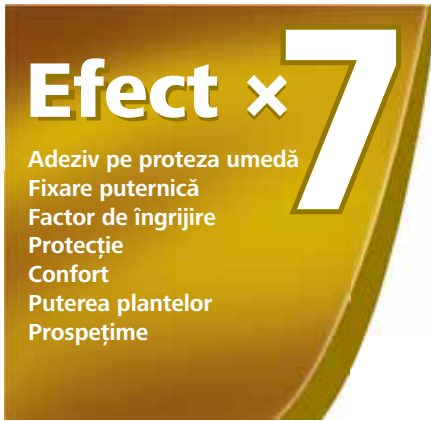

- Adeziv pe proteza umedă:** Poate fi aplicată direct pe proteză, în mediu umed
- Fixare puternică:** Aderență pe termen lung
- Îngrijire:** Vitamina E protejează celulele
- Protecție:** Sigilarea marginală efectivă împiedică pătrunderea resturilor alimentare sub proteză
- Confort:** Datorită elasticității cremei dintre gingie și proteză
- Puterea plantelor:** Formula cu smirnă/salvie/mușețel
- Prospețime:** Gust plăcut și proaspăt de mentă

Protefix® Cremă adezivă **PREMIUM**

Are un efect imediat și de lungă durată și asigură confort natural și siguranță la purtare, chiar și în cazul problemelor dificile de aderență.

Atenție! Vă rugăm să rețineți următoarele sfaturi importante:

- Folosirea cremei adezive ar trebui să fie temporară. Fixarea protezei dvs. trebuie verificată periodic.
- A nu se folosi după termenul de expirare.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor!
- Pentru a preveni formarea unei porțiuni uleioase, presați bine tubul înainte de utilizare, pentru a omogeniza conținutul.
- După utilizare, închideți tubul cu grijă și mențineți orificiul curat și uscat, deoarece pătrunderea oricărui lichid poate provoca întărirea cremei.
- Resturile de cremă adezivă pot fi îndepărtate cu ajutorul unui bețișor cu vată, înmuiat în ulei comestibil.

Compoziție:

Protefix® Cremă adezivă **PREMIUM** conține:

Cellulose Gum (27 %), Calcium/Sodium PVM/MA Copolymer (26 %), Paraffinum Liquidum, Petrolatum, Silica, Chamomilla Recutita, Tocopheryl Acetate, Commiphora Myrrha, Salvia Officinalis, Menthyl Lactate, Mentha Crispa, CI 14720.

Ultima revizuire a instrucțiunilor de utilizare: 09/2019